



CONTENUTO: 1 STICK

CERTEZZA POCKET 1 TEST

Descrizione

Certezza Pocket è un test rapido, monofase immunocromatografico a flusso laterale in stick, per la determinazione qualitativa della gonadotropina corionica umana (hCG) nell'urina al fine di diagnosticare una gravidanza. Il test utilizza una combinazione di anticorpi, compreso l'anticorpo monoclonale anti-hCG, per rilevare in maniera selettiva elevati livelli di hCG. Il test si esegue immergendo direttamente l'estremità assorbente dello stick nel flusso delle urine o nelle urine raccolte in un contenitore. I risultati sono determinati dalla comparsa di linee colorate.

Modo d'uso

Aprire la confezione sigillata, prelevare lo stick e rimuovere il cappuccio colorato. tenere lo stick dalla parte dell'impugnatura, posizionando l'estremità assorbente direttamente sotto il flusso delle urine per almeno 10 secondi (oppure immergerlo in un contenitore pulito e asciutto dove avrete raccolto le urine), fino a completa umidificazione. Fare attenzione a non bagnare le finestre trasparenti del "risultato del test" "T" e di "controllo" "C". Dopo aver rimosso lo stick dalle urine reinserire immediatamente il cappuccio colorato sull'estremità assorbente e appoggiare lo stick su una superficie piana con le finestre "T" e "C" rivolte verso l'alto. Far partire il conteggio del tempo (5 minuti). Nel momento in cui il test inizia a reagire si può osservare un flusso di color rosa muoversi attraverso le finestre T e C.

FITOBUCANEVE
N A T U R A L C A R E P R O D U C T S